

Características



Resistencia a caídas de 1,5 m
(6 superficies)



Resistencia IP55 al agua y al polvo



Cumple las normas para transporte en
helicóptero y otros medios



Equipado con accesorios consumibles
de alta calidad. Las baterías y los
electrodos tienen un ciclo de vida
de hasta 5 años, lo que resulta en
un menor coste total de propiedad.

SKU: 252301810026

Calidad fiable y duradera

BeneHeart ha superado una serie de pruebas rigurosas. BeneHeart puede afrontar con gran confianza diversas situaciones en entornos complicados, cumpliendo con la Ley de Chile N° 21.156.



VER VIDEO

En caso de ayuda o asistencia técnica contactarse a asistencia@steelprosafety.com



mindray

STEELPRO
SAFETY



ESPECIALISTAS
EN SALVAR VIDAS



DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
EXTERNO MINDRAY BENEHEART

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO
EXTERNO MINDRAY BENEHEART

Instrucciones de Uso



Evalúa al paciente. Corroborar que efectivamente este sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Los síntomas son graves e inmediatos, e incluyen: Colapso súbito, falta de pulso y/o falta de respiración.



Llama al 131, abra el gabinete y retire el desfibrilador MINDRAY.



Abra la tapa para encender MINDRAY y estará listo para su uso en 2 segundos.



Ponga los electrodos en el pecho del paciente.



Permita que el DEA haga el análisis de las pulsaciones del paciente.



Asegúrate de que nadie esté tocando al paciente antes de que comiencen las descargas eléctricas.



El DEA indicará si es necesario aplicar la descarga eléctrica (de manera automática). Repita la maniobra de reanimación hasta que llegue el servicio de urgencias.



DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO
MINDRAY C1 BENEHEART

SKU: 252303551058

DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO MINDRAY C2
BENEHEART C/PANTALLA

SKU: 252303551059



Rápido y eficaz ResQNavITM inteligente

En intervenciones de salvamento no profesionales, la habilidad de los rescatadores en el proceso de reanimación es muy variable. Los que carecen de experiencia en reanimación necesitan un asesoramiento más detallado, mientras que las indicaciones demasiado complicadas podrían reducir la eficiencia de los rescatadores.

Basándose en numerosas investigaciones sobre comportamientos y datos psicológicos de los usuarios, la tecnología ResQNavITM puede identificar la condición de cada rescatador y proporcionar instrucciones paso a paso apropiadas para el rescatador en cuestión durante todo el proceso de reanimación.

	Encendido al abrir la tapa	Hasta 3 idiomas para seleccionar	Modo adulto/infantil	Electrodo preconectado para adultos/niños	Versión semi-automática o totalmente automática	Pantalla en color TFT 7". Ajuste automático de brillo de pantalla
MINDRAY C1 BENEHEART	✓	✓	✓	✓	✓	✗
MINDRAY C2 BENEHEART	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Guía de salvamento interactiva

BeneHeart sabe lo que necesitas. Cuando el rescatador está muy nervioso o es inexperto y tarda en colocar los electrodos, ResQNavITM es capaz de reconocer el problema y proporciona instrucciones más detalladas mediante voz.



Proceso continuo de apoyo durante el proceso de RCP

ResQNavITM proporciona navegación de RCP integral para rescatadores de acuerdo con las recomendaciones AHA/ERC más recientes, para ayudarles a realizar la RCP de calidad.

- ☑ El modo RCP se puede configurar como 30:2, 15:2 y solo manual.
- ☑ Fácil cambio de modo adulto a pediátrico.
- ☑ Metrónomo de RCP
- ☑ Resultados de RCP en tiempo real
- ☑ Los estímulos del proceso de RCP pueden alentar al rescatador igual que lo haría un instructor personal y ayudar a salvar vidas.



La administración de la primera descarga tarda menos de 8 segundos. Sin incluir tiempo de colocación de los parches, ya que el dispositivo se precarga durante el análisis de ECG.



	Nombre producto	SKU
	Desfibrilador automático externo Mindray C1 Beneheart	252303551058
	Desfibrilador automático externo Mindray C2 Beneheart c/pantalla	252303551059
	Electrodos adulto/pediátrico Mindray Beneheart (MR62)	252303551060
	Batería Mindray Beneheart C1A/C2	252303551061
	Gabinete pared DEA	252301810028
	Mochila de emergencia de alta visibilidad	252300560637
	Electrodo pediátrico infante mr61	252303552028

En caso de ayuda o asistencia técnica contactarse a asistencia@steelprosafety.com